



معیارهای پذیرش و نحوه برخورد با موارد مشکل دار نمونه عضله جنین

مورد بررسی	معیار پذیرش
الزامات نحوه انتقال	بیش از ۷۲ ساعت از مرگ جنین نگذشته باشد. جهت کشت: نمونه عضله یا محصول سقط باید داخل محلول HamF10 یا نرمال سالین باشد از قرار دادن نمونه در محلول فرمالین خودداری گردد. ظروف، قیچی و تمام پروسه برداشت نمونه باید در شرایط استریل باشد. جهت تست هایی که نیاز به DNA وجود دارد از خشک شدن نمونه جلوگیری شود و تا زمانیکه نمونه لیز نشده باشد امکان کار روی نمونه وجود خواهد داشت.
مقدار نمونه	حداقل اندازه نخود و فاقد چربی

اشکال یافت شده	نحوه برخورد در مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی
عدم رعایت شرایط	تکمیل فرم ثبت مغایرت مدارک و نمونه، ارسال نامه به مرکز ارسال کننده و اطلاع رسانی در خصوص امکان عدم جوابدهی، دریافت نامه کتبی از طرف قرارداد مبنی بر انجام تست با وجود امکان عدم جوابدهی، پذیرش نمونه

TE-PAA-IN-005/00



اولین دارنده استاندارد بین المللی آزمایشگاه های پزشکی ISO-15189 در ایران