

معیارهای پذیرش و نحوه برخورد با موارد مشکل دار نمونه مایع آمنیون



مورد بررسی	معیار پذیرش
کیفیت نمونه	رعایت ضوابط سترون بودن از جمله در مورد ظرف (لوله یا سرنگ) و نحوه بسته بندی نمونه شفاف باشد (خونی و کدر نباشد)
حجم نمونه	تست های سیتوژنتیک: کاریوتاایپ ۲۰ سی سی در دو سرنگ مجزای ۱۰ سی سی، array حداقل نمونه مورد نیاز ۱۰ سی سی، FISH حداقل نمونه مورد نیاز ۵ سی سی تست های مولکولی: QF ۳-۱/۵ سی سی، سایر تست های مولکولی ۱۰-۸ سی سی
الزامات نحوه انتقال	ترجیحا نمونه داخل سرنگ ارسال شود و از انتقال نمونه به لوله فاکون خودداری شود، در صورت انتقال به فاکلون از موارد زیر اطمینان حاصل نمایید: از استریل بودن تمام شرایط و لوله مورد استفاده اطمینان حاصل نمایید. انتقال زیر هود لامینار انجام شود. از عدم جا به جایی لیبل اطمینان حاصل نمایید. هر گونه جا به جایی نمونه به عهده مرکز طرف قرارداد است. حمل و نقل طولانی حداکثر ۲۴ ساعته توسط باربری، ماشین و غیره: - (همانند شکل) - قرارگیری نمونه در کلمن مخصوص - قرارگیری یک بسته یخ ژله ای و یونولیت داخل کلمن - قرارگیری نمونه کنار یونولیت بدون اتصال یا تماس با یخ ژله ای - قرارگیری یخ ژله ای در طرف مقابل یونولیت - جهت جلوگیری از ریختن نمونه ها سر سرنگ با پارافیلیم محکم بسته شود - حمل و نقل از مطب (چند ساعته): - قرارگیری در بسته بندی استریل - نگهداری در دمای ۴ تا ۲۴ درجه سانتیگراد

اشکال یافت شده	نحوه برخورد در مرکز پاتولوژی و ژنتیک کریمی نژاد-نجم آبادی
عدم شفاف بودن نمونه	تکمیل فرم ثبت مغایرت مدارک و نمونه، ارسال نامه به مرکز طرف قرارداد و اطلاع رسانی در خصوص امکان عدم جوابدهی، پذیرش نمونه
کافی نبودن مقدار نمونه	تکمیل فرم ثبت مغایرت مدارک و نمونه، ارسال نامه به مرکز طرف قرارداد و اطلاع رسانی در خصوص امکان عدم جوابدهی، دریافت نامه کتبی از طرف قرارداد مبنی بر انجام تست با وجود امکان عدم جوابدهی، پذیرش نمونه



TE-GET-IN-002/00

اولین دارنده استاندارد بین المللی آزمایشگاه های پزشکی ISO-15189 در ایران

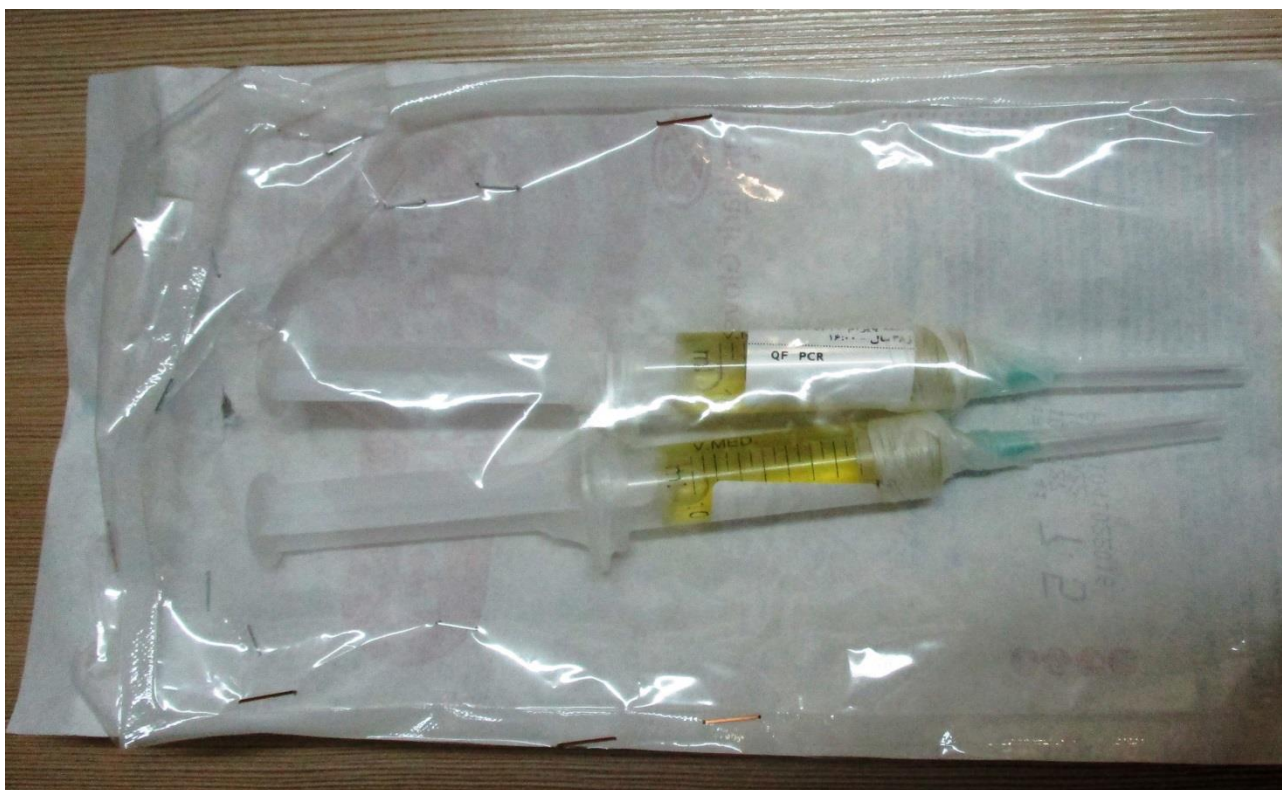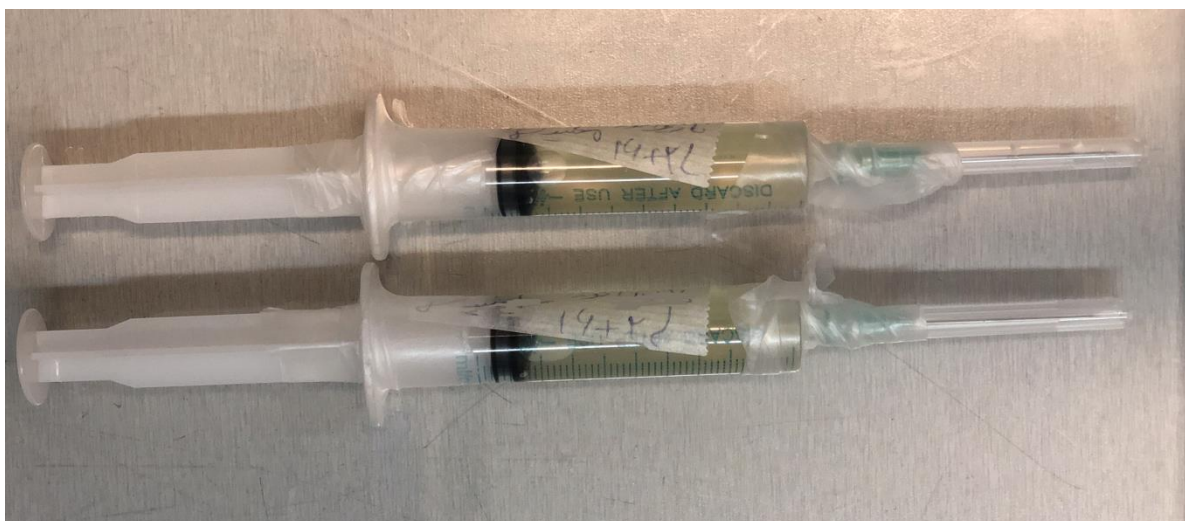

TE-GET-IN-002/00

اولین دارنده استاندارد بین المللی آزمایشگاه های پزشکی ISO-15189 در ایران

۰۲۱ - ۸۸ ۳۶ ۳۹ ۵۵
(+98) 21 88 36 39 55

تهران، شهرک غرب، میدان صنعت، جنب ایستگاه مترو صنعت، پلاک ۲
2#, West Side of Sanat Sq.Metro Station, Shahrak Gharb, Tehran, Iran

www.irangenepath.com
Instagram\Genetics.Center



TE-GET-IN-002/00

اولین دارنده استاندارد بین المللی آزمایشگاه های پزشکی ISO-15189 در ایران