

پروتکل نحوه تهیه و ارسال نمونه پرز جفتی (CVS)

نحوه تهیه نمونه پرز جفتی:

مقدار نمونه مورد نیاز حداقل ۱۰ میلی گرم پرز می باشد. نمونه CVS باید در شرایط کاملاً استریل، زیر هود پاک شده پس از قرار دادن نمونه داخل لوله فالكون و پر کردن لوله با محلول Ham F10 ، RPMI و یا هر محیط کشت در دسترس (جهت جلوگیری از چسبندگی پرزها به جدار لوله در حین حمل و نقل، لوله با محلول کاملاً پر شود) درب لوله فالكون با پارافیلیم بسته شود. لطفاً از هر گونه دستکاری سرنگ ها (خم کردن یا برداشتن نیدل، برداشتن کلاهک، شکستن پیستون و...) خودداری فرمائید.

شرایط نمونه برداری:

بهترین زمان جهت انجام کشت و مطالعه کروموزومی CVS بین ۱۱ الی ۱۳ هفته بارداری می باشد. نمونه برداری قبل از هفته ۱۰ به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

مشخصات الزامی:

نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد مادر، هفته بارداری و در صورت وجود، شماره پذیرش در مرکز کریمی نژاد-نجم آبادی روی سرنگ یا لوله فالكون ثبت گردد.

مدارک مورد نیاز:

مدارک لازم برای انجام آزمایش آخرین سونوگرافی، تست های غربالگری، آزمایشات قبل از بارداری، خلاصه پرونده پزشکی و نسخه پزشک می باشد.

شرایط پیشنهادی نگهداری دمائی و زمانی تا لحظه تحویل به مرکز:

حداکثر ۲۴ ساعت دمای یخچال

سرنگ ها یا لوله های فالكون را داخل فلاسک قرار دهید.

در فصل گرما Ice pack (بسته های یخ) را در داخل فلاسک قرار داده به طوری که یونولیت بین سرنگ ها و بسته یخ خشک قرار گیرد. به هیچ عنوان نمونه های پرز جفتی در مجاورت مستقیم با یخ نباشند. در فصل سرما احتیاجی به استفاده از Ice pack (بسته های یخ) نمی باشد.

بازه زمانی تحویل:

ساعت تحویل نمونه ها در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۷ عصر و روزهای پنجشنبه از ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ظهر می باشد.



TE-CPR-PT-002/02

اولین دارنده استاندارد بین المللی آزمایشگاه های پزشکی ISO-15189 در ایران