

پروتکل نحوه تهیه و ارسال نمونه خون محیطی با ضد انعقاد EDTA

نحوه تهیه نمونه خون

۱۰ سی سی خون محیطی با سرنگ گرفته شود و بلافاصله در لوله های EDTA خالی و ۱۰ بار به آرامی سر و ته شود و یا می توانید با Venoject (سرنگ های خلاء) خون گرفته و مستقیماً خون در لوله های EDTA وارد و ۱۰ بار سر و ته شود. لوله های EDTA باید استریل و در لوله های شرکتی (درب بنفش رنگ) باشند و تاریخ انقضای آن نگذشته باشند.

نحوه تهیه ضد انعقاد

در صورت در دسترس نبودن لوله های شرکتی، جهت تهیه لوله های حاوی EDTA، ۲۰۰ μl از محلول ۰/۵ مولار EDTA برای ۱۰ سی سی خون کافی است. قابل ذکر است احتمال عدم جوابدهی برای لوله های غیر استاندارد و غیر شرکتی وجود دارد.

مشخصات الزامی

نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد بیمار و در صورت وجود، شماره پذیرش در مرکز کریمی نژاد-نجم آبادی روی لوله ثبت گردد.

شرایط پیشنهادی نگهداری دمائی و زمانی تا لحظه تحویل به مرکز

حداکثر ۲۴ ساعت دمای محیط و یا حداکثر ۷۲ ساعت دمای یخچال

لوله ها را داخل فلاسک قرار دهید.

در فصل گرما Ice pack (بسته های یخ) را در داخل فلاسک قرار داده به طوری که یونولیت بین لوله ها و بسته یخ خشک قرار گیرد. به هیچ عنوان نمونه های خون در مجاورت مستقیم با یخ نباشند.

بازه زمانی تحویل

ساعت تحویل نمونه ها در روزهای کاری شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ صبح الی ۱۷ عصر و روزهای پنجشنبه از ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ ظهر می باشد.



TE-MEX-PT-008/03

اولین دارنده استاندارد بین المللی آزمایشگاه های پزشکی ISO-15189 در ایران